

# QUIXX®

Nos slouží jako vstupní brána dýchacích cest a chrání naše plíce.

Zdravý nos filtruje vzduch obsahující různé malé částice, například pylová zrna, zvlhčuje vdechovaný vzduch a ohřívá studený vzduch na tělesnou teplotu dříve, než se dostane do plic.

Uvedené funkce nosu jsou zhoršené při nachlazení, chřipce a alergiích, které jsou provázeny ucpaním nosu nebo rýmou. Přípravek Quixx® uvolňuje ucpaný nos, pomáhá obnovit normální funkce nosu a zlepšuje dýchání nosem.

## 1. CO JE QUIXX® A JAK PŮSOBÍ

100 ml přípravku Quixx® obsahuje 84,6 ml přírodní mořské vody a 15,4 ml čištěné vody.

Roztok je čirý, bezbarvý a bez zápachu.

Přípravek Quixx® je hypertonický nosní sprej (koncentrace solí odpovídá přibližně 26 g NaCl na jeden litr). Obsahuje přírodní mořskou vodu z Atlantického oceánu s hodnotnými minerály a stopovými prvky.

Přípravek Quixx® slouží jako přírodní prostředek na ucpaný nos a dutiny a k uklidnění citlivé nosní sliznice, která je mimořádně důležitá pro udržení zdravého dýchacího systému.

### JAKÝM ZPŮSOBEM ZLEPŠUJE PŘÍPRAVEK QUIXX® VAŠE DÝCHÁNÍ

- Účinně uvolňuje ucpaný nos a dutiny v důsledku nachlazení, chřipky nebo alergií
- Aktivně čistí nosní cesty
- Zvlhčuje nosní sliznici

Přípravek Quixx® pomáhá obnovit funkce nosu, a tím snižuje riziko komplikací (zánět dutin, zánět středního ucha) a zlepšuje dýchání.

## PŘÍPRAVEK QUIXX® MÁ TAKÉ NÁSLEDUJÍCÍ VÝHODY

- Obsahuje pouze přírodní složky
- Bez konzervačních činidel
- Není návykový
- Bezpečný při dlouhodobém použití

## 2. KDO MŮŽE UŽÍVAT PŘÍPRAVEK QUIXX®

Dospělí, děti a kojenci ve věku 6 měsíců a starší.

Přípravek Quixx® lze také používat během těhotenství a kojení.

## 3. JAK SE PŘÍPRAVEK QUIXX® POUŽÍVÁ

Přípravek Quixx® používejte vždy podle tohoto návodu k použití. Pokud si nejste jistý/á, prosíme zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Product:	Quixx®
Product No.:	F051865, F050731 (V052671/01)
Language:	Czech
Size:	160 x 180 mm
Colours:	1. Pantone 282
Datum:	30.04.09 Melchert/Wei BC 09-1134



## Dávkování:

*Kojenci (ve věku 6 měsíců a starší) a děti:*

1 až 2 vstříky do každé nosní dírky 2 až 3krát denně.

*Dospělí:*


1 až 3 vstříky do každé nosní dírky 2 až 3krát denně.

Bez omezení délky použití.


## Použití spreje:

Sejměte víčko. „Připravte“ lahvičku několika násobným stlačením pumpičky, dokud se nezačne tvořit jemná mlha (obr. 1). Sprej je připraven k použití:


Vložte trysku do nosní dírky a stlačte manžetu po obou stranách trysky (obr. 2). Po každém použití vyčistěte trysku a vyměňte víčko.

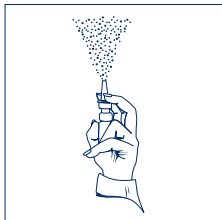

Obr. 1

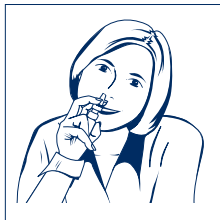

Obr. 2

Nepoužívejte přípravek Quixx® po uplynutí doby použitelnosti, která je uvedena na krabičce za symbolem .

Přípravek Quixx® lze používat po dobu až 6 měsíců ode dne prvního použití.

## 4. KONTRAINDIKACE

Přecitlivělost (alergie) na mořskou vodu.

## 5. NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Na počátku užívání se může vyskytnout slabé štípání.

## 6. JAK SE PŘÍPRAVEK QUIXX® UCHOVÁVÁ

- Uchovávejte při pokojové teplotě.
- Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

## 7. POPIS BALENÍ

Quixx® se dodává v lahvičce obsahující 30 ml roztoku. Lahvička obsahuje vestavěnou pumpičku s antibakteriálním systémem, který brání kontaminaci po celou dobu užívání.

Každá lahvička obsahuje přibližně 220 vstříků.

Quixx® je zdravotnický prostředek.



Výrobce:  
Pharmaster  
ZI de Krafft  
67150 Erstein  
Francie

Distributor:  
BERLIN-CHEMIE AG  
(MENARINI GROUP)  
Glienicke Weg 125  
12489 Berlin  
Německo

**Poslední revize 01/2009**

CZ / 51 / V052671/01 / AV1CP60100



BERLIN-CHEMIE AG

Leaflet

Product:	Quixx®
Product No.:	F051865, F050731 (V052671/01)
Language:	Czech
Size:	160 x 180 mm
Colours:	1. Pantone 282
Datum:	30.04.09 Melchert/Wei BC 09-1134

Re-proofing

Ready for printing

Signature \_\_\_\_\_