

# QUIXX<sup>®</sup> soft

Pro každodenní péči o nos a zachování zdravých nosních funkcí

Nos je branou do našich dýchacích cest a chrání naše plíce. Nosní sliznice, pokud je neporušená a optimálně zvlhčena, filtruje a zvlhčuje vzduch vstupující do dýchacího systému a také ohřívá studený vzduch na tělesnou teplotu.

Znečištěný, chladný a/nebo suchý vzduch (například ve vytápěných či klimatizovaných prostorách, automobilech, vlacích či letadlech) však často vyvolává vysychání a podráždění nosní sliznice a zhoršuje její funkci.

Quixx soft je přírodní přípravek ke zklidnění citlivé nosní sliznice, který jí pomáhá zachovat vlhkost, filtrovat a také zvlhčovat proudící vzduch. Tím přispívá k tomu, aby dýchací systém zůstal zdravý.

## Co je Quixx soft a co obsahuje

Quixx soft je přírodní izotonický nosní sprej, který obsahuje mořskou vodu z Atlantského oceánu s hodnotnými minerály a stopovými prvky a přidaným výtažkem z Aloe vera.

Koncentrace soli v přípravku Quixx soft je přizpůsobena úrovni přirozené pro lidské tělo a sprej je tedy k Vašemu nosu šetrný.

Ve 100 ml přípravku Quixx soft je obsaženo 28,6 ml vody z Atlantského oceánu, 71,4 ml čištěné vody a 0,05 g extraktu Aloe vera.

## Na co se Quixx soft používá?

- Každodenní péče o nos a jeho čištění
- Podpůrný prostředek při prevenci nosních příznaků nachlazení
- Úleva pro vysušenou, podrážděnou či bolavou nosní sliznici
- Podpůrná léčba rýmy a zánětu nosních dutin
- Pomoc pro děti, které se ještě neumí vysmrkat

## Jak Quixx soft působí?

- Quixx soft čistí nos:  
Změkčuje nahromaděný hlen v nose a tím ulehčuje jeho odstranění. Vymývá z nosu alergenů a mikroby, čímž snižuje jejich expozici na nosní sliznici.

- Quixx soft zvlhčuje nosní sliznici a pomáhá ulevit podrážděné nosní sliznici:

Voda z Atlantského oceánu obsažená v přípravku Quixx soft zvlhčuje nosní sliznici a podporuje její filtrační funkci. Výtažek z Aloe vera dále podporuje zvlhčující účinek slané vody a pomáhá zklidnit a ulevit podrážděné nosní sliznici.

### Quixx soft má také následující výhody:

- Obsahuje pouze přírodní látky
- Bez obsahu konzervantů
- Nevyvolává závislost
- Bezpečný při dlouhodobém používání

## Proto Quixx soft podporuje ochranné funkce nosu a pomáhá jej zachovat zdravý.

## Kdo může Quixx soft používat?

Dospělí, mladiství a děti starší 6 měsíců.

Quixx soft je také možné používat během těhotenství a kojení.

## Jak se Quixx soft používá?

*Malé děti (starší 6 měsíců) a děti do věku 5 let:*

1 vstřík do každé nosní dírky až 4x denně.

*Děti starší 6 let a dospělí:*

1–3 vstříky do každé nosní dírky několikrát denně, podle potřeby.

## Jak se Quixx soft používá?

Sejměte kryt. „Připravte“ lahvičku několikastranným stlačením pumpičky, dokud se nezačne tvořit jemná mlha (Obr. 1). Nyní je sprej připraven k použití:

Vložte trysku do nosní dírky a stlačte manžetu po obou stranách trysky (Obr. 2). Po každém použití očistěte trysku a nasadte kryt.

Tryska vystřikuje odměřenou dávku spreje, který se rovnoměrně rozptyluje a zvlhčuje a současně čistí nosní sliznici.

BERLIN-CHEMIE AG		9,5 pt	Leaflet
Product:	Quixx <sup>®</sup> soft		
Product No.:	V071656/01		
Language:	Chzech		
Size:	160 x 300 mm		
Colours:	1. Pantone 282		
Datum:	25.10.11	Melchert	BC 11-4271

Re-proofing

Ready for printing

Signature \_\_\_\_\_



Obr. 1



Obr. 2

### Jak dlouho se může Quixx soft používat?

Pro délku používání neexistuje žádné omezení. Budete-li mít nějaké otázky, zeptejte se, prosím, lékárníka.

### Kdy se Quixx soft nesmí používat?

Quixx soft nepoužívejte, pokud jste přecitlivělý/á (alergický/á) na mořskou vodu nebo na Aloe vera.

### Možné nežádoucí účinky


Doposud nejsou známy žádné nežádoucí účinky.

### Jak uchovávat Quixx soft

- Přípravek uchovávejte při pokojové teplotě.
- Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

### Popis balení

Quixx soft se dodává v lahvičce obsahující 30 ml roztoku. Každá lahvička obsahuje přibližně 220 vstříků. Pumpa lahvičky obsahuje zabudovaný antibakteriální systém, který po celou dobu používání zabráňuje bakteriím kontaminovat přípravek.

Nepoužívejte Quixx soft po době použitelnosti vyznačené na obalu za symbolem .

Quixx soft spotřebujte do 6 měsíců od otevření lahvičky.

Výrobce:  
PHARMASTER  
ZI de Krafft  
67150 Erstein  
Francie

Distributor:  
BERLIN-CHEMIE AG  
(MENARINI GROUP)  
Glienicke Weg 125  
12489 Berlín  
Německo



Poslední revize textu 10/2011

CZ / 301 / V071656/01 / NOT22309V01

BERLIN-CHEMIE AG		9,5 pt	Leaflet
Product:	Quixx® soft		
Product No.:	V071656/01		
Language:	Chzech		
Size:	160 x 300 mm		
Colours:	1. Pantone 282		
Datum:	25.10.11	Melchert	BC 11-4271

Re-proofing

Ready for printing

Signature



○

○