

# QUIXX<sup>®</sup> extra

Pro přirozené uvolnění ucpaného nosu a pocit svěžesti

Nos je vstupní branou dýchacích cest a chrání naše plíce.

Zdravý nos filtruje, zvlhčuje a ohřívá vdechovaný vzduch předtím, než vstoupí do našeho těla. Při rýmě a chřipce, doprovázené ucpaným nosem nebo výtokem z nosu, jsou tyto funkce narušené. Dlouhodobě ucpaný nos a nadměrné hromadění hlenu ve vedlejších nosních dutinách může zvýšit riziko vzniku komplikací (např. zánět dutin, zánět středního ucha nebo zánět průdušek).

Quixx extra pomáhá přirozeně uvolnit ucpaný nos a vedlejší nosní dutiny.

## Co je Quixx extra a co obsahuje

Quixx extra obsahuje vodu z Atlantského oceánu s hodnotnými minerály a stopovými prvky a eukalyptovou silici.

Koncentrace solí v přípravku Quixx extra (odpovídající přibližně 2,6% roztoku NaCl) je vyšší než jejich koncentrace ve sliznici nosu; tento hypertonický roztok solí tak vytváří osmotický tlak, který napomáhá dekongesci (uvolnění nosu).

Quixx extra obsahuje vodu z Atlantského oceánu, čištěnou vodu a eukalyptovou silici (0,015 ml na 100 ml).

Quixx extra je dodáván v lahvičkách s obsahem 30 ml roztoku. Jedna lahvička vystačí k podání přibližně 220 vstříků. Lahvička je vybavena pumpičkou s antibakteriálním systémem, který brání vstupu bakterií během celé doby používání.

## K čemu se Quixx extra používá?

- Uvolňuje ucpaný nos a dutiny při rýmě nebo chřipce
- Aktivně čistí nosní dýchací cesty
- Má silný osvěžující účinek

### Další výhody Quixx extra:

- Obsahuje pouze přírodní složky
- Neobsahuje konzervační látky
- Nevyvolává závislost

## Jak Quixx extra působí?

Quixx extra uvolňuje ucpaný nos a přináší pocit svěžesti.

Díky koncentraci solí, která je vyšší než v nosní sliznici, z ní nosní sprej Quixx extra účinně odstraňuje přebytečnou tekutinu, čímž mírní otok sliznice a uvolňuje ucpaný nos a dutiny.

Quixx extra ulehčuje vysmrkání změkčením nahromaděného hlenu a zaschlých krust.

Osvěžující eukalyptová silice přináší pocit čistého a průchodného nosu i dutin a usnadňuje dýchání.

## Kdo může používat Quixx extra?

Quixx extra mohou používat dospělí, dospívající a děti od 6 let věku.

## Použití Quixx extra

### Jak často a v jakých dávkách se má Quixx extra používat?

*Dospělí a dospívající:*

1–3 vstříky do každé nosní dírky 2–3x denně.

*Děti od 6 let věku:*

1–2 vstříky do každé nosní dírky 2–3x denně.


Před použitím protřepejte.

### Jakým způsobem se Quixx extra používá?

Z lahvičky sejměte kryt. Před prvním použitím několikrát pumpičku stlačte, dokud se nezačne tvořit jemná mlha (obr. 1). Nyní je sprej připraven k použití:

Zasuňte trysku do nosní dírky a dvěma prsty stlačte obě strany manžety nástavce (obr. 2). Po každém použití trysku očistěte a znovu na ni nasadte kryt.

Tryska spreje vytváří přesné množství aerosolu, který se rovnoměrně rozptýlí.

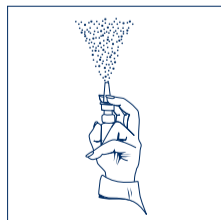

Obr. 1



Obr. 2

BERLIN-CHEMIE AG	9,5 pt	Leaflet
Product:	Quixx <sup>®</sup> extra	
Product No.:	V075112/01	
Language:	Czech	
Size:	160 x 300 mm	
Colours:	1. Pantone 282	
Datum:	03.04.12 Melchert / uk	BC 12-1114

Re-proofing

Ready for printing

Signature \_\_\_\_\_

### Jak dlouho je možné Quixx extra používat?

O době používání se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

### Kdy se Quixx extra nesmí používat?

Quixx extra se nesmí používat v případě přecitlivělosti (alergie) na mořskou vodu nebo eukalyptovou silici.

Quixx extra nesmí používat děti mladší 6 let.

### Těhotenství a kojení

O použití Quixx extra během těhotenství a kojení se poraďte se svým lékařem.

### Opatrnost při používání Quixx extra

Po operaci či úrazu nosu je možné Quixx extra používat jen po poradě s lékařem.


### Možné vedlejší účinky

Eukalyptová silice může u citlivých osob vyvolat alergické reakce (včetně dušnosti).

Na začátku používání se může objevit slabý pocit štípání.

### Jak skladovat Quixx extra

- Uchovávejte při pokojové teplotě.
- Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Nepoužívejte Quixx extra po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za symbolem .

Nepoužívejte Quixx extra déle než 6 měsíců od prvního dne použití.

Quixx extra je dostupný bez lékařského předpisu.



Výrobce:  
Pharmaster  
ZI de Krafft  
67150 Erstein  
Francie

Distributor:  
BERLIN-CHEMIE AG  
(MENARINI GROUP)  
Glienicke Weg 125  
12489 Berlín  
Německo

**Datum poslední revize: 02/2012**

CZ / 398 / V075112/01 / NOT23609V01

BERLIN-CHEMIE AG		9,5 pt	Leaflet
Product:	Quixx® extra		
Product No.:	V075112/01		
Language:	Czech		
Size:	160 x 300 mm		
Colours:	1. Pantone 282		
Datum:	03.04.12	Melchert / uk	BC 12-1114

Re-proofing

Ready for printing

Signature



○

○