

# Návod k použití

## QUIXX<sup>®</sup> acute

### Hypertonický nosní sprej/aerosol s mořskou vodou k péči o nos a přirozenému uvolnění nosu

QUIXX<sup>®</sup> acute neobsahuje léčiva, je to sterilní sprej bez zápachu k výplachu nosu, který napomáhá uvolnit nos při zánětu vedlejších nosních dutin, ucpaném nosu, senné rýmě, alergiích a v rámci péče o nos po jeho operaci. Hypertonická koncentrace soli 2,6 % podporuje přirozené uvolnění nosu.

**QUIXX<sup>®</sup> acute obsahuje:** přírodní mořskou vodu (zředěnou čištěnou vodou na 2,6 %)

### Jak QUIXX<sup>®</sup> acute zlepšuje Vaše dýchání

- Zajišťuje přirozené vyčištění nosu a jeho uvolnění
- Napomáhá uvolnit podrážděný nos při nachlazení, chřipce, alergiích nebo alergické rýmě
- Ředí hlen a tím ulehčuje jeho odstranění, např. při nachlazení a alergiích
- Ulevuje od místních příznaků akutních infekcí horních cest dýchacích a také akutního a chronického zánětu nosní sliznice a vedlejších nosních dutin

### QUIXX<sup>®</sup> acute má také následující výhody

- Neobsahuje léčiva, nezpůsobuje závislost, může být používán dlouhodobě
- Nádobka může být uchovávána ve vodorovné poloze, aniž by se vylila
- Lze používat až do poslední kapky (v nádobce nic nezůstává)
- Nosní roztok neobsahuje hnací plyn ani konzervanty, je sterilní

### Kdo může používat QUIXX<sup>®</sup> acute

Dospělí, děti ve věku 3 let nebo starší.

QUIXX<sup>®</sup> acute je také možné používat během těhotenství a kojení.

### Jak používat QUIXX<sup>®</sup> acute

QUIXX<sup>®</sup> acute používejte vždy přesně podle tohoto návodu k použití. Pokud si nejste jistý(á), zeptejte se, prosím, svého lékaře nebo lékárníka.

### Přípravek doporučujeme používat následujícím způsobem:

Quixx<sup>®</sup> acute používejte až 5krát denně, když přetrvávají obtíže s ucpaným nebo suchým nosem.

1. Podle potřeby se vysmrkejte.
2. Sejměte víčko z trysky.
3. Nádobku držte v libovolném úhlu a trysku jemně vložte do nosní dírky.
4. Mírně nakloňte hlavu na opačnou stranu než je nosní dírka, kterou chcete pročistit.
5. Stiskněte aplikátor nahoře na nádobce na 1-2 vteřiny.
6. Postupně vstříkněte sprej do jedné i druhé nosní dírky.
7. Po každém použití očistěte a osušte trysku a uzavřete víčkem.
8. Při vyplachování nosu doporučujeme používat přípravek nad dřezem nebo umyvadlem.

Z hygienických důvodů a kvůli zamezení vzájemného přenosu infekce mezi uživateli má být nádobka používána jen jedním uživatelem.



### **Kontraindikace**

Známá precitlivělost na jakékoli složky tohoto přípravku.

### **Varování**

Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.

- Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
- Nepochichujte nebo nespalujte ani po použití.
- Chraňte před slunečním zářením.
- Nevystavujte teplotě přesahující 50°C/122°F.
- Uchovávejte mimo dosah dětí.

### **Preventivní opatření**

- Používání tohoto přípravku více než jednou osobou může šířit infekce, vyčistěte trysku v mýdlové vodě a po každém použití ji vypláchněte horkou vodou.

**Výdej zdravotnického prostředku možný bez lékařského předpisu.**

### **Doba použitelnosti**

36 měsíců

Po prvním otevření může být přípravek používán po dobu 12 měsíců. Díky speciální technologii ventilu bag-on-valve zůstává roztok sterilní až do poslední kapky. Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti.

### **Podmínky uchování**

Uchovávejte při teplotě 15°C až 30°C

Uchovávejte mimo dosah dětí.

### **Velikost balení**

100 ml

[Symbol 5.1.1 manufacturer DIN EN ISO 15223-1:2012]

### **Výrobce**

AURENA LABORATORIES AB, Fjärrviksvägen 22, SE-65350 Karlstad, Švédsko

[CE značka] 0413

### **Distributor**

Berlin-Chemie AG (Menarini Group), Glienicke Weg 125, 12489 Berlín, Německo

### **Datum revize**

Únor 2017

[Symbol 5.2.4 sterile using irradiation DIN EN ISO 15223-1:2012]

[REF 1018-6]

[Ver: YYYY-MM-DD]

[Symbol 5.1.5 LOT DIN EN ISO 15223-1:2012]

[Symbol 5.1.4 sand glass DIN EN ISO 15223-1:2012]

Viz dno nádoby/krabičky

[Symboly kódu jazyka pro každou verzi podle ISO-639-1]